

LINGETTES SPORICIDES CLINELL®

1. INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

1.1 **Classe du DM** : IIa

1.2 **Descriptif du dispositif** :

Lingettes sèches non tissées contenant une combinaison de poudres, qui, au contact de l'eau, génèrent de l'acide peracétique pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs.

Dimensions : 210 x 300 mm.

Pliage de la lingette en Z.

pH : 9

Propriétés microbiologiques :

Bactéries :

- EN 13727 : Escherichia coli : actif en 1 minute
- EN 13727 : Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium (VRE) : actif en 10 secondes.
- EN 1276 – EN 14561 : Pseudomonas aeruginosa : actif en 30 secondes
- EN 13727 - EN 14561 : Staphylococcus aureus : actif en 1 minute
- EN 13727 - EN 14561 : Enterococcus hirae : actif en 30 secondes

Spores :

- ASTM – E2362-09, EN 13704 – EN 16615 : Clostridium difficile : actif en 2 minutes
- Bab et a, EN 13704I : Bacillus subtilis : actif en 5 minutes

Mycobactéries :

- EN 14563 – EN14348 : Mycobacterium terrae : actif en 2 minutes

Champignons :

- EN 14562 – EN 13727 : Candida albicans : actif en 1 minute
- EN 14562 : Aspergillus niger : actif en 5 minutes

Virus :

- EN 14476 : Adenovirus, Poliovirus : actif en 1 minute



1.3 Références catalogue :

UCD : unité de commande ; **CDT** : multiple de l'UCD ; **QML** : Quantité minimale de livraison

Référence	Descriptif	CDT	UCD	QML
CS25	Lingettes sporicides Clinell®	Boite de 25 lingettes	1 boite	Boite de 25 lingettes

1.4 Composition du dispositif et accessoires :

Générateur peroxygéné inorganique, Tetra acetylenediamine, agents modificateurs de pH, tensioactifs.

Présence de latex : Non

Présence de phtalates : Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique : Non

1.5 Domaine – Indications :

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs, dont les sondes d'échographies

Usage unique : Oui

2. PROCEDES DE STERILISATION

Dispositif médical stérile : Non

Mode de stérilisation du dispositif : NA

3. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

EDM

1 rue des Boisseliers 95330 Domont - France • Tel : + 33 (0)1 30 11 83 00 • Fax : + 33 (0)1 39 35 75 25
 www.edm-imaging.com

SAS au Capital de 29727 € - TVA FR 49 340 561 257 - SIRET 340 561 257 00049 - PONTOISE B 340 561 257 - NAF 4646Z

Conditions normales de conservation et de stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil.

Précautions particulières : NA

Durée de validité du produit : 2 ans.

Sachet ouvert : 1 mois.

4. CONSEILS D'UTILISATION

4.1 **Mode d'emploi :** Retranscription des instructions d'utilisation du fabricant.



Porter une protection oculaire et des gants



Retirer une lingette du paquet.



Pour l'activer, mouiller la lingette avec de l'eau sous un robinet ou en la plongeant dans un seau.



Essorer la lingette pour enlever l'excédent d'eau.



Essuyer la surface sale en faisant un « S », de la zone propre vers la zone sale, en prenant soin de ne pas aller deux fois sur la même zone. Laisser agir 2 minutes.



Changer la lingette si elle devient sèche ou souillée et la jeter à la poubelle. Laissez la surface sécher à l'air.

4.2	<p>Précautions d'emploi : Porter une protection oculaire et des gants en utilisant ces lingettes. A utiliser dans une zone bien ventilée. Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant et si elles peuvent l'être facilement. Continuer de rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison / médecin.</p> <p>Conserver hors de portée des enfants.</p> <p>Ne pas utiliser ces lingettes sur les dispositifs médicaux complexes ou invasifs.</p>
4.3	<p>Contre-indications : NA</p>